

# Bionect® Creme



## Produktbeschreibung

BIONECT® Creme ist eine topische Zubereitung, ihr Hauptbestandteil ist Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid (Glykosaminoglykan), das in der extrazellulären Matrix der meisten Gewebe vorkommt. Auf Grund ihrer wasserbindenden Eigenschaften sorgt sie für ein feuchtes Milieu um und zwischen den Zellen, das die Wanderung der Zellen erleichtert.

## Zusammensetzung

*Hauptbestandteil:* Hyaluronsäure-Natriumsalz 0,2 %

*Weitere Bestandteile:* Polyethylenglykol 400 Monostearat, Ölsäuredecylester, Emulgator-Wachs, Glycerol, Sorbitollösung 70%, Dehydracetsäure Natrium-Salz, Methyl p-hydroxybenzoat, Propyl p-hydroxybenzoat, Duftstoffe, gereinigtes Wasser.

## Indikationen

BIONECT® Creme ist indiziert für die Behandlung kutaner Reizungen und Verletzungen. Insbesondere dient sie dazu, akute und chronische Wunden abzudecken (Abschürfungen, Spenderstellen und postoperative Einschnitte, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, vaskuläre und metabolische Geschwüre und Druckentzündungen) und ein feuchtes Umfeld der Wunde zu gewährleisten, um so vor Abschürfung, Reibung und Austrocknung zu schützen.

## Dosierung und Anwendung

Vor der Behandlung sollte eine Reinigung und Desinfektion der Wunden oder Geschwüre erfolgen. Zwei- oder mehrmals täglich eine dünne Schicht der Creme auf die Wundoberfläche auftragen. Die behandelte Fläche sollte mit einer sterilen Gazekompressen und einem sterilen Verband abgedeckt werden.

## Kontraindikationen

Bionect® Creme darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile angewendet werden.

## Warnung und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Nicht nach dem auf der Packung angegebenen Ablaufdatum verwenden.

Das Ablaufdatum gilt für das Produkt, wenn dieses in seiner Originalverpackung bei Temperaturen unter 30 °C aufbewahrt wurde.

Vermeiden Sie direkten Kontakt der Tube mit der Wunde.

Jede Tube Bionect® Creme ist nur von einem Patienten zu verwenden, um das Risiko gegenseitiger Infektion zu reduzieren.

Nach Gebrauch gemäß den geltenden lokalen Bestimmungen entsorgen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### **Nebenwirkungen**

Nachstehende lokale Nebenwirkungen können fallweise auftreten: Ausschlag an der Anwendungsstelle, Juckreiz, Brennen, Hautreizung, Trockenheit, Erythem, Dermatitis, Hautverfärbung. Die Symptome sind im Allgemeinen schwach, klingen rasch ab und erfordern selten eine vorzeitige Beendigung der Behandlung.

### **Wechselwirkungen**

Nicht gleichzeitig mit Desinfektionsmitteln anwenden, die quartäre Ammoniumsalze enthalten, da Hyaluronsäure in deren Gegenwart ausfallen kann. Bei gleichzeitiger äußerlicher Wundbehandlung mit Antibiotika oder sonstigen lokalen Mitteln sind keine Wechselwirkungen oder Unverträglichkeiten mit Bionect® Creme aufgetreten.

### **Lagerung**

Unter 30 °C lagern

### **Darreichung**

Kartonschachtel mit einer 30 g Tube

### **Hersteller:**

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (Padua), Italien



**Datum der letzten Revision der Gebrauchsanweisung: Juli 2011**